



FULLY COMPATIBLE GRADE HEMATOLOGY REAGENTS

REACTIVOS HEMATOLOGIA PARA ANALIZADORES CELL-DYN ABBOTT

Uso

Reactivos para ser utilizados en analizadores de hematología Cell-Dyn Abbott. Para uso In Vitro exclusivamente.

Especificaciones

| ABBOTT | | |
|---------|---------------|-----------|
| CODIGO | NOMBRE | CONTENIDO |
| 3310020 | Diluent CD3 | 20lt |
| 3330004 | Lyse CD3 | 3.8lt |
| 3320020 | Detergent CD3 | 20lt |

Instrumentos:

CELL-DYN 1300, 1400, 1600, 1700, 1800

Procedimiento:

- Retire las mangueras de las botellas de reactivo
- Limpie las mangueras con un paño y enjuáguelas con agua destilada.
- Coloque nuevamente las mangueras en las botellas de reactivos LABNOVATION
- Realice por lo menos 5 corridas. Verifique que los valores obtenidos sean aceptables. Es normal obtener conteos elevados al principio. Los valores deben normalizarse después de varias corridas.
- Realice pruebas con su control de calidad de 3 niveles
- Recalibre si es necesario.

Precauciones:

- La calibración es recomendada cuando se cambia de lote o de marca de reactivos
- **No se recomienda mezclar** reactivos de diferentes marcas en un mismo analizador.
- No mezcle reactivo nuevo con reactivo usado
- No se ingiera. Evite el contacto con los ojos
- En caso de contacto con la piel o los ojos lave con abundante agua y busque ayuda médica
- Par uso profesional. Para Diagnóstico in Vitro

Almacenaje:

Almacene los productos en un lugar fresco y seco (5°C a 35°C) y libre de polvo. Almacenaje fuera del rango de temperaturas puede dañar el producto. Una vez abiertos los reactivos deben utilizarse en 60 días