



FULLY COMPATIBLE GRADE HEMATOLOGY REAGENTS

REACTIVOS HEMATOLOGIA PARA ANALIZADORES MINDRAY 3 PART-DIFF

Uso

Reactivos para ser utilizados en analizadores de hematología Mindray 3 Part-Diff. Para uso In Vitro exclusivamente.

Especificaciones

LABNOVATION		
CODIGO	NOMBRE	CONTENIDO
L03020	Diluent BC3	20LT
L9800	Lyse BC3	500ML
L3120	Rinse &HGBRef	20LT

Instrumentos:

BC2300, BC2600, BC,2800, BC,3000, BC3000 PLUS, BC3200

Procedimiento :

- Retire las mangueras de las botellas de reactivo
- Limpie las mangueras con un paño y enjuáguelas con agua destilada.
- Coloque nuevamente las mangueras en las botellas de reactivos LABNOVATION
- Realice por lo menos 5 corridas. Verifique que los valores obtenidos sean aceptables. Es normal obtener conteos elevados al principio. Los valores deben normalizarse después de varias corridas.
- Realice pruebas con su control de calidad de 3 niveles
- Recalibre si es necesario.

Precauciones:

- La calibración es recomendada cuando se cambia de lote o de marca de reactivos
- **No se recomienda mezclar** reactivos de diferentes marcas en un mismo analizador.
- No mezcle reactivo nuevo con reactivo usado
- No se ingiera. Evite el contacto con los ojos
- En caso de contacto con la piel o los ojos lave con abundante agua y busque ayuda médica
- Par uso profesional. Para Diagnóstico in Vitro

Almacenaje:

Almacene los productos en un lugar fresco y seco (5°C a 35°C) y libre de polvo. Almacenaje fuera del rango de temperaturas puede dañar el producto. Una vez abiertos los reactivos deben utilizarse en 60 días